


FREEDOM60®

Une partie du système de perfusion intégré Freedom

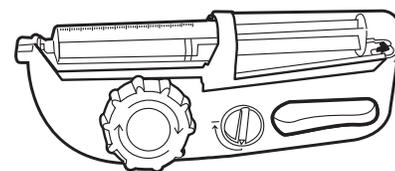

123

Facile à utiliser & à enseigner

Seulement 2 boutons.
Remonter, charger & perfuser !



Assurance qualité

Fabriquée aux États-Unis avec un haut niveau de contrôle pour un produit zéro défaut



Seringue BD® 50 ml

Manipulation et purge d'air faciles.
Peut être rempli de 1 ml à 50 ml.



Large molette

Ergonomique, facile à saisir et à tourner, se débraye lorsque FREEDOM60® est en marche, ne peut pas être trop remontée.



Pression de sécurité constante

Système de pression constante très précis, répondant aux normes de précision ISO pour une administration précise des médicaments



Technologie avancée

Toutes les pièces sont conçues pour s'adapter et fonctionner ensemble. Le moteur Negator est le «cœur» du FREEDOM60®.



Usage patient

Pas de pièces électriques sensibles ni de maintenance préventive, conçues pour résister à un usage domestique fréquent.



bouton on/off encastré

Aucune activation ou désactivation involontaire.



Équilibre dynamique (DynEQ™)

Si la pression augmente dans les sites d'injection, le système répond immédiatement en ralentissant automatiquement.



Portable

Pas de piles ni d'électricité nécessaires. Livré avec une sacoche de voyage pour favoriser l'autonomie du patient.



Porte-seringue

Verrouille la seringue et la maintient en bonne position, empêche tout retrait par inadvertance pendant l'administration.



Capot protège seringue

Contrôle facile de la progression de la perfusion, protège la seringue.

NOTE: Utilisez UNIQUEMENT les accessoires du système KORU Freedom avec FREEDOM60®. L'utilisation de tout autre accessoire peut entraîner une administration excessive de solutés, des débits inconnus ou des complications supplémentaires sur le site telles que douleur, gonflement et rougeur.

Produits associés au système intégré Freedom :



Pompe FreedomEdge®

Pour de plus petites doses de perfusion, seringues BD® 20 et 30 ml



Aiguilles SC sécurisées HlgH-Flo®

24G & 26G, long. 4 -14 mm, jeux 1- 4 aiguilles



Tubulure de précision

débits de F0.5 - F2400



Extension de tubulure 60 cm (FEXT)

Pour plus de longueur



distribué en France par :



KORU Medical Systems | 845•469•2042 | korumedical.com | @korumedical

FREEDOM60® et FreedomEdge®, Precision Flow Rate Tubing™ et HlgH-Flo Subcutaneous Safety Needle Sets™ sont des marques déposées de KORU Medical Systems et sont conformes à la directive 93/42/EEC sur les dispositifs médicaux. KORU Medical Systems est certifié ISO 13485. ©2020 KORU Medical Systems ; tous droits réservés. F60_FL_Benefits_03-10005vD

IMM

2 rue Marcel Paul 90000 BELFORT
Tél. 03 84 27 25 22 Fax. 03 84 27 25 23
contact@immfrance.fr