

Pourquoi choisir les tubulures RMS?

Parmi les nombreux avantages des tubulures RMS, l'un des plus importants est DynEQ™. La tubulure capillaire "Précision" apporte un flux constant qui se combine avec la pression de sécurité constante du FREEDOM60® et du FreedomEdge® pour répondre en temps réel au site de perfusion du patient. Si la pression au site de perfusion augmente, le système répond en diminuant progressivement la perfusion - immédiatement et automatiquement.

How to use RMS Precision Flow Rate Tubing™ sets:

1 Connect Syringe




Connect the luer disc end of the tubing set to the syringe.

2 Connect Set




Connect the male end of the tubing set to the indwelling catheter (IV) or needle set (Sub-q).

3 Check Luer Disc

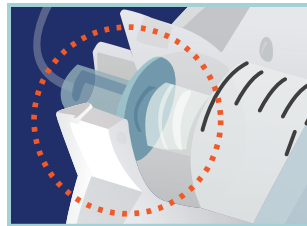

When inserting the syringe into syringe driver, make sure the tubing luer disc is fully seated in the driver's nose.

4 Emergency

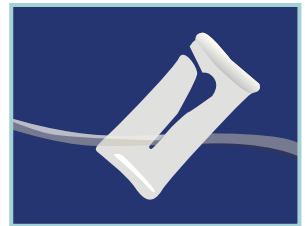

To immediately stop flow, in an emergency, pull the tubing through the slide clamp.

