


EGALISATION DE PRESSION

Connecté à un flacon de médicament, l'adaptateur de flacon ProSeal égalise la différence de pression avec le flacon. Sans système d'égalisation de pression, les différences de pression peuvent entraîner la formation de fins aérosols qui peuvent s'échapper dans l'air et exposer l'environnement, les patients et les professionnels de santé à des médicaments dangereux. D'autres dispositifs en système clos (CSTD) utilisent un filtre intégré pour purifier l'air évacué, contaminé par des vapeurs de médicaments ou des aérosols dangereux. Avec l'adaptateur ProSeal, la chambre extensible recueille et emprisonne l'air filtré dans le dispositif.

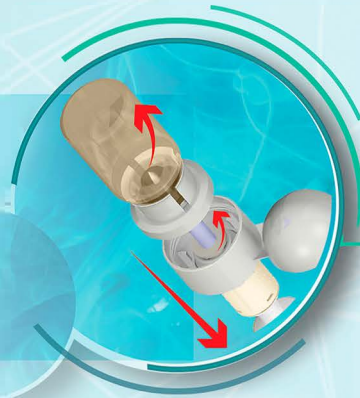


CONNEXIONS SÈCHES

Les connecteurs secs sont une caractéristique importante des dispositifs de transfert en système clos (CSTD) et des sites d'injection : ils garantissent l'absence de fuite de gouttelettes, d'aérosols ou de vapeurs. Des tests avec marqueur de substitution (fluorescéine) confirment l'absence de résidus de fluide sur les surfaces injectées. Le site d'injection ProSeal et toutes les membranes d'interface permettent une connexion sèche 100% efficace lors du transfert de fluide.





PROTECTION MICROBIENNE

L'efficacité de la préservation de l'intégrité microbiologique des produits préparés est démontrée par un test de provocation microbienne : des conteneurs de milieu de croissance ont été équipés de sites d'injection ProSeal. Les surfaces de la membrane ont été contaminées artificiellement avec un inoculum de micro-organismes. Après nettoyage au désinfectant, plusieurs échantillons ont été prélevés. À la fin de la période test de 7 jours, le récipient est incubé pour vérifier la croissance microbienne. Toutes les manipulations ont été effectuées dans des conditions ISO 5 pour simuler une situation réelle. Les résultats confirment que les composants ProSeal empêchent la pénétration microbienne durant au moins 168 heures (7 jours).

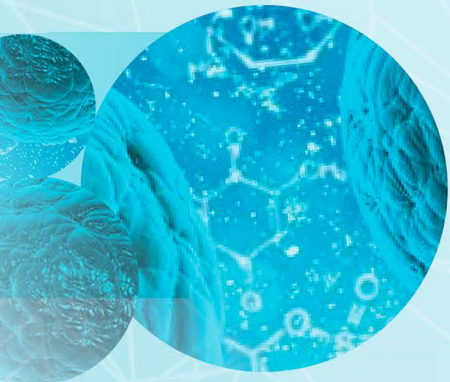

Ref 420020

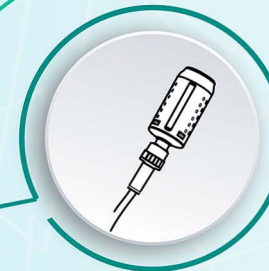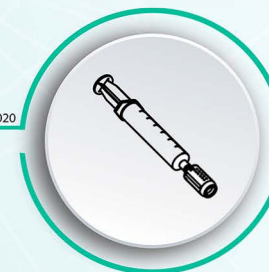


Ref 421010




Ref 423010



Ref 422010

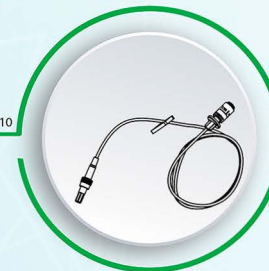

Ref 423010

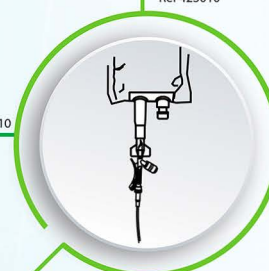

Ref 422030



Disponibilité Décembre 2019, USP <800> est une norme pour la manipulation des médicaments dangereux ayant un impact significatif sur les établissements de santé. ProSeal permet la manipulation de médicaments dangereux en réduisant la contamination de surface et le déversement de résidus.

ProSeal™

Closed System Transfer Device

Réf421010 Injecteur ProSeal
Réf422010 Site d'injection ProSeal
Réf420020 Adaptateur de flacon ProSeal 20 mm, pression 20 ml
Réf420010 Adaptateur de flacon ProSeal 13 mm, pression 20 ml
Réf420030 Adaptateur de flacon ProSeal 20 mm, pression 50 ml
Réf420040 Adaptateur de flacon ProSeal 28 mm, pression 60 ml

Réf423010 Percuteur pour poche avec site d'injection ProSeal
Réf423040 Extension de tubulure 30 cm Y/NFC et site d'injection ProSeal
Réf423030 Extension de tubulure 30 cm et site d'injection ProSeal
Réf423011 Spike de transfert 20 mm ProSeal & injecteur ProSeal
Réf423020 Spike de transfert 20 mm ProSeal & site d'injection ProSeal
Réf422030 Adaptateur pour poche

Réf424010 Dispositif d'assemblage d'adaptateur de flacon

Distribué en France par :



IMM 2 rue Marcel Paul
90000 BELFORT
Tél 03 84 27 25 22
contact@immfrance.fr



MT Promed Consulting GmbH
Altenhofstr. 80
66386 St. Ingbert Germany
+49-6894-581020



Epic International Thailand Co., Ltd
WHA Eastern Seaboard Industrial Estate
500/73 M.2 Tasit Amphur Pluakdaeng Rayong
Thailand 21140

CE 0123

Exposure safe

Vial to Patient

