


# FREEDOM60<sup>®</sup>

Syringe Infusion System

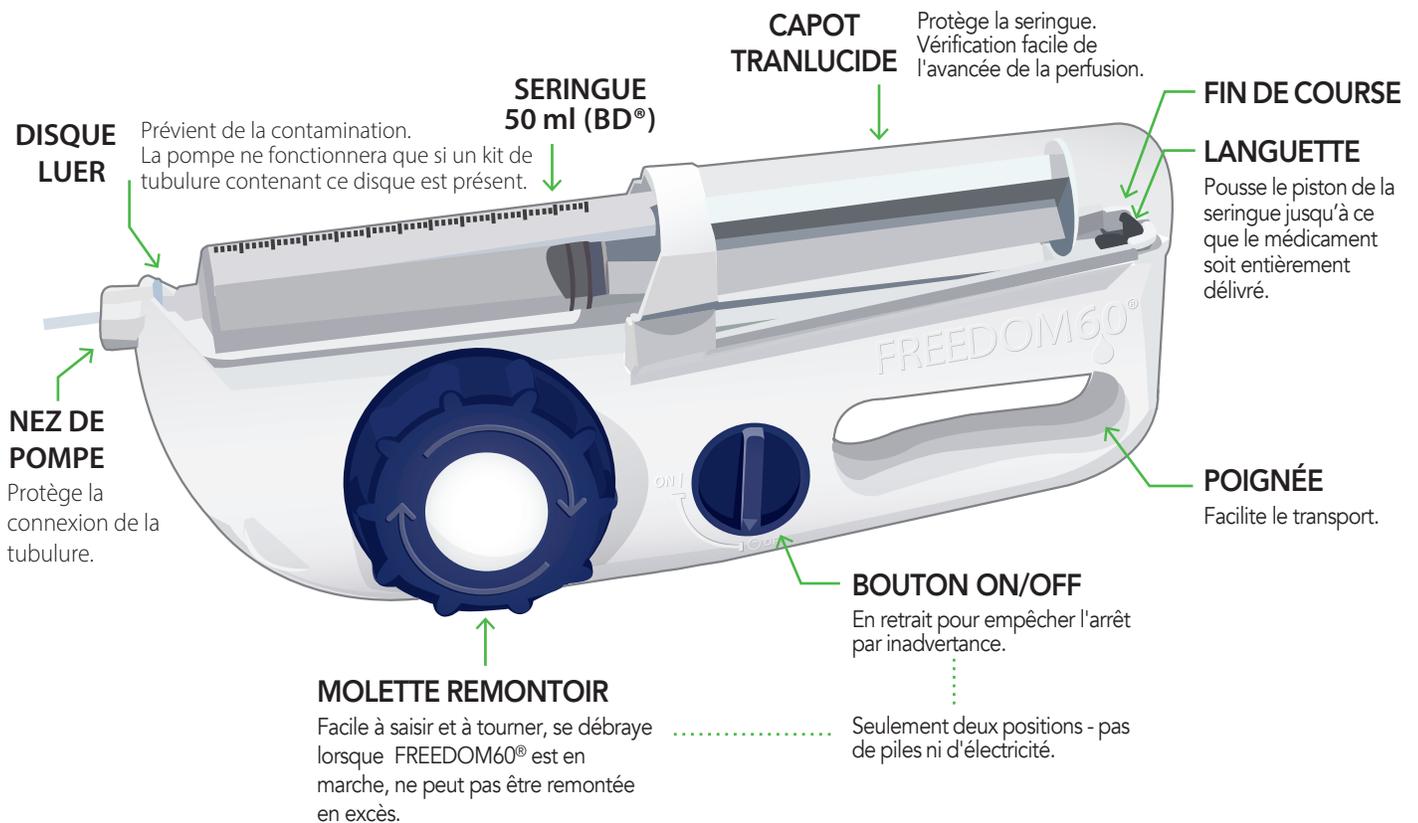


## Indications :

Le système de perfusion avec seringue FREEDOM60<sup>®</sup> est indiqué pour la perfusion de solutions médicamenteuses


## Des perfusions aussi faciles que 1, 2, 3...

### 1 Remonter

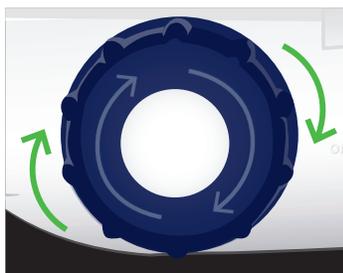


Remonter la molette jusqu'à ce que la languette noire soit en fin de course.

### 2 Charger

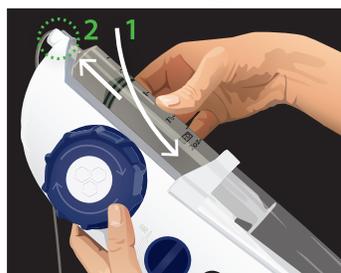

Charger la seringue remplie.

### 3 Perfuser

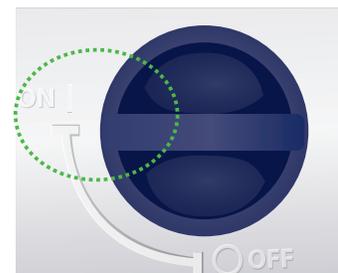

Mette sur ON et en route !

# FREEDOM60<sup>®</sup>

Syringe Infusion System

## Facile à utiliser :

- Seulement deux boutons :
  - Large molette remontoir ergonomique facile à saisir et à tourner
  - Bouton ON/OFF encastré et protégé
- Juste 3 étapes – remonter, charger et perfuser
- Entièrement portable :
  - Pas de piles ni d'électricité nécessaire
  - Sacoche de voyage incluse pour un transport facile
- Pas d'alarme ni de maintenance

## Totale sécurité :

- Maintien une pression de sécurité constante
- Seul les systèmes KORU Freedom possèdent le DynEQ™ (Équilibre Dynamique) permettant :
  - Une réponse automatique à l'augmentation de la pression (saturation des tissus) en ralentissant le débit de perfusion
- Le maintien de la pression une fois la perfusion terminée pour empêcher le retour sanguin ou celui du médicament
- Élimine :
  - Les problèmes liés au bolus
  - les débordements
  - Les surdosages ou perfusion incontrôlée

## Qualité & conception robuste :

- Fabriqué aux États-Unis avec le plus haut niveau de contrôle qualité pour un produit sans défaut
- Conception robuste avec boîtier en plastique ABS moulé
- Aucune pièce électrique sensible
- Système fiable

## Polyvalent :

- Utilisable pour différents types d'administrations
- Set de tubulures de précision de F0.5 à F2400

## Informations

### Description produit :

Pousse seringue FREEDOM60<sup>®</sup> avec pochette de transport (noire)  
Pochette de transport de remplacement - noire  
Pochette de transport motif zébré

### Ref :

F10050

F10090

F10080



## Spécifications techniques

### Pousse seringue :

Poids : 0,4 kg  
Long : 304 mm  
Larg : 114 mm  
Haut : 41 mm

### Système :

Précision : +/- 15%  
Volume résiduel : <0,4 ml

### Seringue :

Volume du réservoir : 50 ml (seringues 50 ml BD<sup>®</sup>)

## Autres dispositifs



### Pousse seringue FreedomEdge<sup>®</sup>

Pour les petits volumes à perfuser, seringues de 20 ou 30 ml



**Tubulure de précision (Precision Flow Rate Tubing™)** pour les débits F0,5 à F240



### Sets d'aiguilles sous-cutanées sécurisées (High-Flo Subcutaneous Safety Needle Set™)

disponibles en 24 G et 26 G, 4 mm à 14 mm de longueur, et jeu de 1 à 6 sites



### Extension de tubulure 60 cm (FEXT)

Pour ceux qui ont besoin de plus de longueur