



REEMPLISSAGE AVEC UN SET DE TRANSFERT*

Étape 1 - Percuter la poche

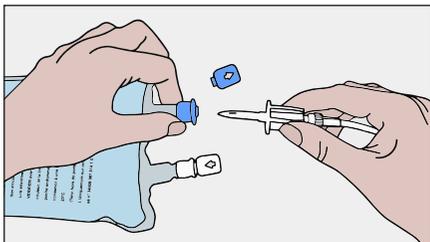


- > Préparer votre matériel
- > Après avoir retiré les protections, percuter la poche avec la pointe du set de transfert

Étape 2 - Fixer la seringue au set de transfert

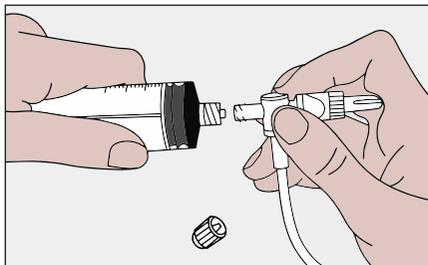


- > Retirer le capuchon de protection du set de transfert
- > Visser et adapter la seringue Luer Lock (type BD®)

Étape 3 - Commencer à remplir la seringue

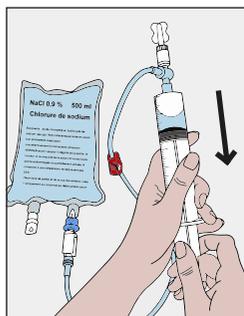


- > Aspirer le soluté en tirant sur le piston de la seringue

Étape 4 - Purger l'ensemble

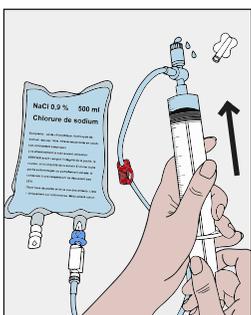


- > Retirer le capuchon à ailettes du set de transfert
- > Purger l'ensemble en poussant sur le piston de la seringue

Étape 5 - Remplir la seringue une 1^{ère} fois

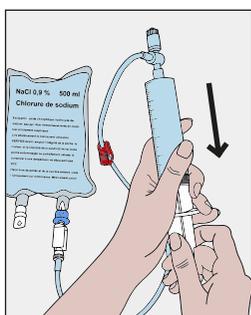


- > Remplir complètement et précisément une 1^{ère} fois la seringue en tirant sur le piston

Étape 6 - Brancher le diffuseur SMARTeZ®

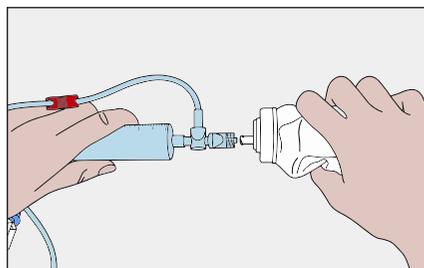


- > Visser l'ensemble sur le port de remplissage du diffuseur

Étape 7 - Remplir le diffuseur

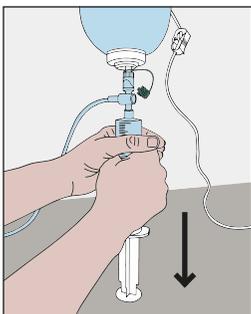


- > Retourner l'ensemble sur une surface plane
- > Appliquer les mains sur le corps de la seringue et appuyer fermement l'ensemble vers le bas
- > Répéter les étapes 5 et 7 afin de remplir le diffuseur au volume souhaité

Étape 8 - Détacher le diffuseur portable

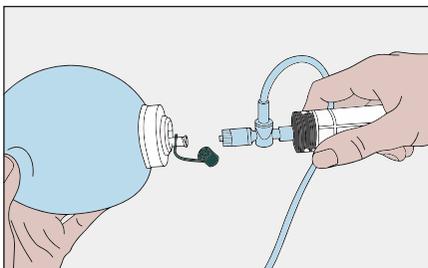

- > Dévisser et débrancher le diffuseur du set de transfert, replacer le capuchon protecteur du diffuseur

Étape 9 - Purger la tubulure

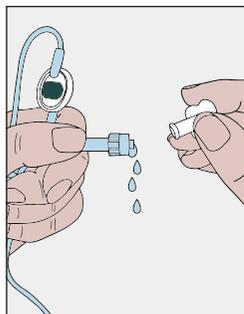


- > Dévisser le capuchon à ailettes en bout de tubulure du diffuseur portable
- > Attendre et laisser perler une goutte de soluté en veillant à maintenir le filtre à particules et à air au dessus du diffuseur
- > Replacer le capuchon à ailettes - le diffuseur est prêt à être posé

Pour les diffuseurs portables **SMARTeZ®** de gros volume (ex. ≥ 400 ml), il est très pratique d'utiliser un set de transfert pour effectuer le remplissage du diffuseur.

Avec le set de transfert, l'opération de remplissage est plus facile, plus rapide et surtout moins fastidieuse. Enfin les risques d'erreur d'asepsie sont également réduits.

Le set de transfert **SMARTeZ®** est un dispositif médical de nouvelle génération. Muni d'un nouveau clamp ergonomique, il fonctionne automatiquement sans robinet trois voies moins pratique. Cette performance est rendue possible grâce à un double jeu de valves régulant automatiquement les sens de circulation du soluté.

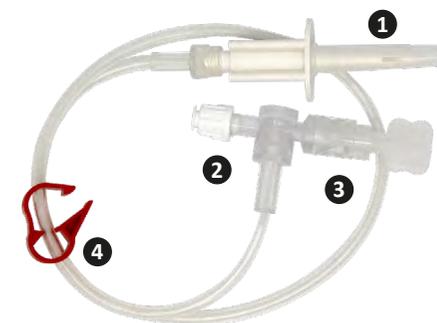

- 1 Spike (pointe)
- 2 Port de connexion de la seringue
- 3 Port de connexion du diffuseur portable
- 4 Clamp ON/OFF



IMM 2 rue Marcel Paul 90000 BELFORT
Tél. 03 84 27 25 22 Fax 03 84 27 23
contact@immfrance.fr
www.immfranec.fr

