


ProSeal™ Set mode dégradé ID 20 mm

Dispositif permettant l'injection directe en système clos d'un médicament et la purge de la voie d'abord en fin d'injection

Indications : le dispositif de transfert en système clos **ProSeal™** empêche mécaniquement les contaminants extérieurs de pénétrer dans le système et la fuite de médicaments ou de vapeurs du système, minimisant ainsi l'exposition individuelle et environnementale aux vapeurs de médicaments, aérosols et déversements. Il est indiqué pour l'injection de médicaments sensibles, en cas de non possibilité pour le professionnel de santé de disposer d'une unité de pharmacotechnie hospitalière.

1x

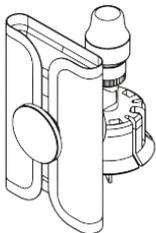

+

REF 420310 ToxiSeal Adaptateur de flacon avec chambre d'égalisation de pression externe


Volume chambre d'égalisation de pression externe 80ml

Taille pores du filtre à air 0,1µm

Filtre au charbon actif

DMA compatible (Dymethylacetamide)

2x

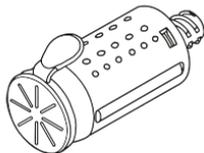

+


REF 421010 ProSeal™ injecteur - adaptateur de seringue

Volume de purge 0,02 ml

Aiguille interne acier inoxydable 18G

Raccord externe Luer Lock femelle (ISO 80369-7)

1x

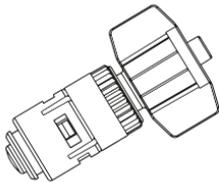

REF 422070 ProSeal™ Site d'injection avec ailettes

Volume de purge 0,22 ml

Raccord externe Luer Lock mâle (iso 80369-7)




code GTIN 3701416800051

CE 0123

STERILE EO



Rx

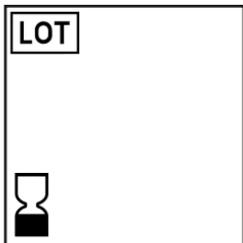

2 rue Marcel Paul
90 000 BELFORT
Tél. 03 84 27 25 22
FAX 03 84 27 25 23
www.immfrance.fr
contact@immfrance.fr



Epic International (Thailand)
Co.,Ltd. Hemaraj Eastern
Seaboard Industrial Estate
500/73 Moo, Tasit, PLusak-
daeng, Rayong Thailand 21140

MT Promedt Consulting GmbH
Altenhofstr.80
63386 St. Ingbert Germany
+49-6894-581020


EC REP

ProSeal™ Set mode dégradé ID 20 mm

Mode d'emploi (utiliser une technique aseptique)




1

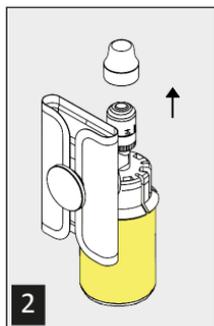

2




3

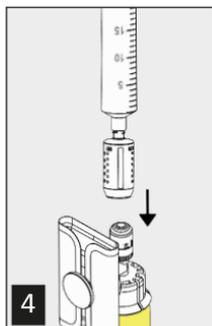


4


- 1 Percuter l'adaptateur de flacon sur le flacon de médicament.
- 2 Retirer le capuchon protecteur.
- 3 Visser l'adaptateur de seringue (injecteur) sur une seringue vide.
- 4 Connecter l'ensemble seringue - injecteur au site d'injection de l'adaptateur de flacon.

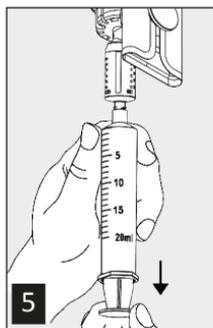


5

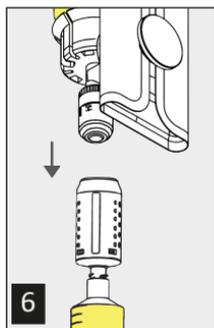

6

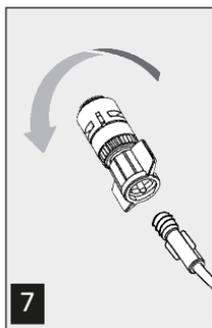

7

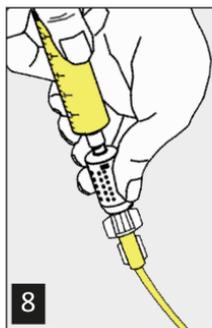

8

- 5 Retourner l'ensemble, tirer sur le piston de la seringue pour prélever le médicament.
- 6 Déconnecter la seringue remplie de l'adaptateur de flacon.
- 7 Adapter le site d'injection sur la voie d'abord du patient. Avant chaque accès, tamponner la membrane du site d'injection avec de l'alcool isopropylique à 70% (15 sec), laisser sécher (environ 30 sec).
- 8 Connecter l'ensemble seringue remplie - injecteur au site d'injection de la voie d'abord, pousser le piston pour administrer le médicament.

- Si un rinçage de la voie d'abord est envisagé, répéter les **étapes 3 et 8** avec l'injecteur supplémentaire fourni dans le set.

- Éliminer les dispositifs usagés conformément aux procédures d'élimination des matières biologiques dangereuses de votre établissement.