


HighFlo™

Sets d'aiguilles sécurisées sous-cutanées

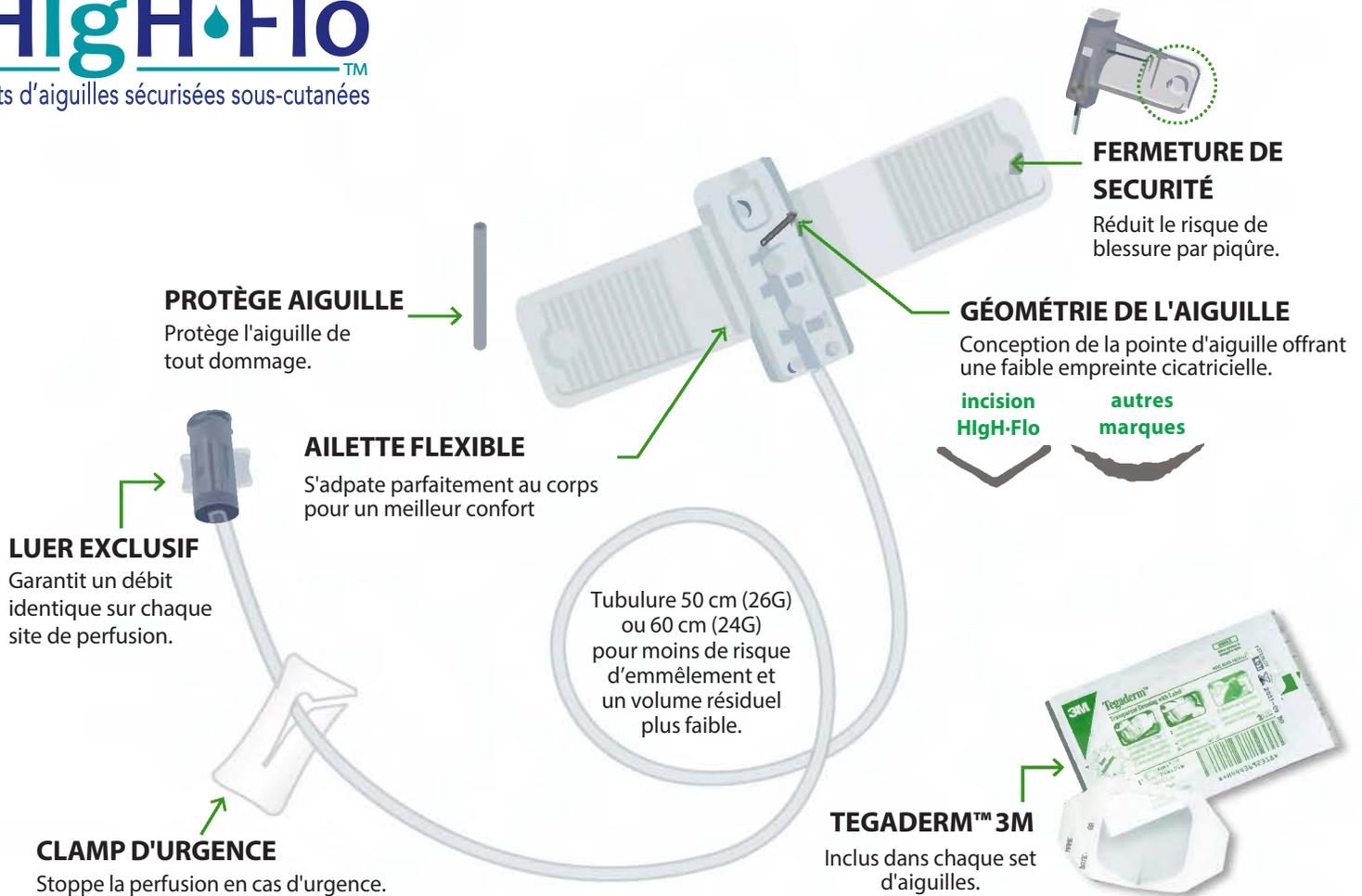

Indications :

les sets d'aiguilles HighFlo Subcutaneous Safety Needle Sets™ sont conçus pour la perfusion sous-cutanée de solutions médicamenteuses prescrites pour pompe externe ou pour pousse seringue et seringue.

Manipulation des sets d'aiguilles HighFlo :

1 Retirer le bouchon



Retirer le bouchon de protection de l'extrémité du set d'aiguille et la connecter à la tubulure de précision Flow Rate Tubing.

2 Retirer la languette



Retirer le lien de fermeture des ailettes et séparer chaque ailette.

3 Replier les ailettes




Plier et maintenir les ailettes vers l'arrière pour dégager la protection de l'aiguille.

4 Insérer l'aiguille



Retirer le protège aiguille et insérer l'aiguille dans le tissu sous-cutané avec un angle de 90°. Recouvrir avec un pansement adhésif.

5 Retirer l'aiguille

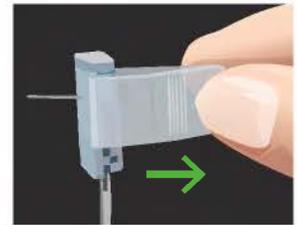

Une fois la perfusion terminée, retirer l'adhésif, réunir les ailettes et les clipser pour sécuriser l'ensemble.



Sets sécurisés

- Fermeture de sécurité protégeant des blessures accidentelles par piqûre
- Clamp d'arrêt d'urgence de la perfusion sur chaque tubulure
- Véritable pansement Tegaderm™ 3M maintenant les aiguilles en place durant la perfusion
- Fabriqué aux États-Unis avec le plus haut niveau de contrôle qualité pour un produit sans défaut

Conception avancée

- Profil d'aiguille avancé
 - Minimise les lésions tissulaires, les cicatrices et les réactions sur site
 - Favorise une cicatrisation rapide
- Luer exclusif pour un débit totalement identique sur chaque site
- Ailettes flexibles pour une adaptation parfaite au corps du patient et un maintien en place de l'aiguille sans tension

Polyvalentes

- Aiguilles disponibles en 4, 6, 9, 12 et 14 mm de longueur
- Calibre 24 ou 26 gauge
- Raccord Y pour combiner des ensembles jusqu'à 8 sites ou perfuser avec 2 longueurs d'aiguille différentes
- Sets disponibles en configuration 1, 2, 3 et 4 sites d'injection

Références

Sets d'aiguilles 26 Gauge (50 cm)

Sets 1 aiguille boîte de 20

Longueur Réf.

4mm RMS12604
6mm RMS12606
9mm RMS12609
12mm RMS12612
14mm RMS12614



Sets 2 aiguilles boîte de 10

Longueur Réf.

4mm RMS22604
6mm RMS22606
9mm RMS22609
12mm RMS22612
14mm RMS22614



Sets 3 aiguilles boîte de 10

Longueur Réf.

4mm RMS32604
6mm RMS32606
9mm RMS32609
12mm RMS32612
14mm RMS32614



Sets 4 aiguilles boîte de 10

Longueur Réf.

4mm RMS42604
6mm RMS42606
9mm RMS42609
12mm RMS42612
14mm RMS42614



Sets d'aiguilles 24 Gauge (60 cm)

Sets 1 aiguille boîte de 20

Longueur Réf.

6mm RMS12406
9mm RMS12409
12mm RMS12412
14mm RMS12414



Sets 2 aiguilles boîte de 10

Longueur Réf.

6mm RMS22406
9mm RMS22409
12mm RMS22412
14mm RMS22414



Volumes résiduels

26 Gauge	1 aiguille	2 aiguilles	3 aiguilles	4 aiguilles
Vol. Rés.	.1 ml	.2 ml	.3 ml	.4 ml

24 Gauge	1 needle	2 needle
Vol. Rés.	.4 ml	.7 ml

Autres dispositifs :



Pompe FREEDOM60®

Pour des volumes de perfusion importants, seringue BD® 50 ml



Pompe FreedomEdge®

Pour des volumes de perfusion faibles, seringues 20 et 30 ml



Tubulure de précision Flow Rate Tubing™

Débits de perfusion pré-déterminés F0.5 à F2400



Extension de tubulure 60 cm (Réf. FEXT)

Pour ceux qui souhaitent plus de longueur

distribué en France par :



International Medical Mediation
6 rue de Besançon - 90000 BELFORT
Tél. 03 84 27 25 22 - Fax 03 84 27 25 23
contact@immfrance.fr