

Indications :

les sets d'aiguilles HlgH-Flo Subcutaneous Safety Needle Sets™ sont conçus pour la perfusion sous-cutanée de solutions médicamenteuses prescrites pour pompe externe ou pour seringue.


Manipulation des sets d'aiguilles HlgH-Flo :

1 Retirer le bouchon



Retirer le bouchon de protection de l'extrémité (Luer Femelle) du set d'aiguille et la connecter à la tubulure de précision Flow Rate Tubing.

2 Retirer la languette

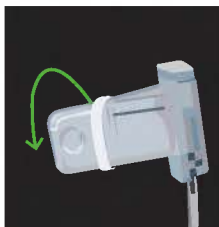

Retirer le lien de fermeture des ailettes et séparer chaque ailette.

3 Replier les ailettes




Plier et maintenir les ailettes vers l'arrière pour dégager la protection de l'aiguille.

4 Insérer l'aiguille



Retirer le protège aiguille et insérer l'aiguille dans le tissu sous-cutané avec un angle de 90°. Recouvrir avec un pansement adhésif.

5 Retirer l'aiguille

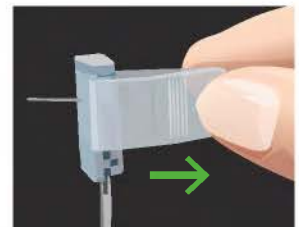

Une fois la perfusion terminée, retirer l'adhésif, réunir les ailettes et les clipser pour sécuriser l'ensemble.

